

Manual de Utilizare pentru Fotoliul Rulant cu Toaletă DrHappy JL609

Felicitări pentru achiziționarea fotoliului cu vas de toaletă! Acest manual vă va ghida pas cu pas în procesul de instalare și utilizare a acestui dispozitiv. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a vă asigura că utilizați corect produsul și pentru a evita orice problemă potențială.



Sistem
blocare
roți

A. Asamblare și Reglare

1. Scoaterea din Ambalaj:

- Îndepărtați produsul din cutia de transport.
- Deschideți cadrul scaunului cu roțile conform instrucțiunilor din imaginea 1.

2. Instalarea Plăcii Scaunului:

- Stabiliți placa scaunului pe cadrul scaunului cu roțile, asigurându-vă că este bine fixată, conform imaginii 2.

3. Montarea Galetii:

- Fixați găleata și așezați-o sub placa scaunului, conform instrucțiunilor din imaginea 3.



Imagine 1



Imagine 2



Imagine 3

B. Siguranță și Întreținere

1. Verificare înainte de Utilizare:

- Verificați strângerea șuruburilor și stabilitatea cadrului scaunului cu roțile înainte de fiecare utilizare.

2. Curățare și Dezinfectare:

- Efectuați o curățare și dezinfectare periodică a fotoliului rulant cu toaletă. Evitați utilizarea soluțiilor agresive care ar putea deteriora materialele.
- Depozitați fotoliul rulant într-un mediu uscat

3. Limită de Greutate:

- Capacitatea maximă de încărcare a fotoliului rulant cu toaletă DrHappy JL609 este de 100 kg. Utilizatorii nu trebuie să depășească această limită pentru a evita accidentele și deteriorarea produsului.

Informații Suplimentare:

• Caracteristici și Specificații:

- Fotoliul rulant cu toaletă DrHappy JL609 este dotat cu un cadru rezistent din oțel-carbon și roți solide pentru o deplasare sigură și liniștită.
- Dimensiunile și specificațiile detaliate ale fotoliului rulant sunt:
 - Lățime Deschis: 63 cm
 - Lățime Pliat: 24 cm
 - Lățime Șezut: 45 cm
 - Adâncime Șezut: 44 cm
 - Înălțimea Scaunului: 52 cm
 - Înălțimea Spătarului: 40 cm
 - Înălțime Totală: 87 cm
 - Lungime Totală: 104 cm
 - Greutate Maximă Suportată: 100 kg

Acest manual de utilizare este destinat să ofere informații esențiale pentru asamblarea, utilizarea și întreținerea fotoliului rulant cu toaletă DrHappy JL609. Vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați instrucțiunile pentru a vă asigura că produsul funcționează corect și în siguranță. Pentru orice întrebări sau nelămuriri suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență tehnică.

