

Manual de utilizare

Desingul, proiectarea și calitatea asigură un maximum de confort, siguranță în utilizare și fiabilitate. Gama de cărucioare poate fi folosită atât în interior cât și în exterior, procesul de producție fiind realizat în China. Acest manual de utilizare conține mici sugestii pentru utilizarea corectă a scaunului cu roțile alese de dumneavoastră și sfaturi pentru siguranța dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți întreg manualul cu atenție înainte de a utiliza scaunul WC cu roțile și să țineți cont de recomandările făcute. Scaunele sunt testate și certificate pentru o utilizare normală și corectă, pe pacienți cu o greutate de până la 110 kg. Partile componente ale unui scaun:



Asamblarea Comodei WC de camera cu roti

**figura 1**

manual de către dumneavoastră.



urcati sau coborati din scaunul rulant

Notes:

1. Verificati stabilitatea scaunului inainte de utilizare
2. Greutatea maxima sustinuta este de 100 kg
3. Ungeți roțile regulat

Comoda WC mobilă, are doua părți componente, ansamblul spătar și ansamblul șezut. Se introduc barele de fixare ale ansamblului spătar în barele de fixare ale ansamblului șezut și se blochează cu piesele care trec prin găurile de fixare ale celor doua componente.

Se ridică bratele și se fixează cu partea de sprijin a bratelor (ce capitonată) în poziție orizontală. Fixarea se face cu sistemul, se trage de bila și apoi se eliberează tija de fixare în gaura pentru fixare. Se iau suportii pentru sprijinul picioarelor, pe fiecare laterala fata, stânga – dreapta, se găsesc tijele pentru fixarea acestor suportii. Recipientul pentru necesități se introduce sub colac prin culisare pe cele doua barete de susținere.

Comoda se poate igieniza periodic, se scot: recipientul pentru necesități, colacul și capacul, se pot spala cu un detergent lichid sau soluție de săpun, se clătesc în jet de apă curentă, se șterg și se montează pe scheletul comodei. În general comoda WC se amplasează în apropierea patului persoanei cu probleme de deplasare pentru a facilita transferul acestuia pe comode și ulterior înapoi în pat, sau fotoliu. comodei până când pe fiecare suport este o clapeta cu arc care blochează suportul în poziția de lucru.

Șezutul propriu-zis, este montat pe un schelet metalic și se poate ridica pentru a utiliza recipientul pentru necesități. Pentru utilizarea pe post de WC se ridică perna, astfel devine accesibil recipientul de colectare a necesităților. Acest recipient se deplasează pe orizontală, pe doua glisiere și poate fi extras de sub șezut trăgându-l prin spatele comodei. Extragerea prin spate nu deranjează utilizatorul comodei care poate rămâne așezat pe aceasta. Rotile din spate ale comodei au frâne pentru blocare. Dacă se apasă în jos clapeta frânei va bloca roata aceasta rămânând în starea blocat. Dacă ridicăm clapeta, frâna va debloca roata aceasta rămânând în poziția de rotire liberă.

Utilizarea comodei WC mobilă sau fixă

În recipientul pentru colectarea necesităților puneți înainte de utilizare un sac menajer din pvc, cu marginile răsfrânte peste recipientul de colectare. În interiorul sacului menajer amplasați un strat de hârtie igienică cu rol de absorbant al stropilor de urină. După colectare ridicați și înlocuiți sacul menajer cu unul nou.

Scoaterea / montarea suportului de picioare

La modelele care au suportul de picioare detasabil pentru a scoate pedalele, trageți de maneta de pe suport spre interior pentru eliberarea pârghiei, glisați structura pe exterior și ridicați suportul de pe cele două cuie metalice de susținere. Pentru montarea pedalelor, executați aceeași procedură în sens invers. Apasați ușor pe pedala până în poziția orizontală ca în fig1.

Nu presați suportul de picioare la urcarea și coborârea din cărucior!!



(fig1)

Urcarea în scaun

Aduceți scaunul rulant cât mai aproape de dumneavoastră. Blocați frânele roților din spate, recomandabil ar fi să aveți grijă la brațe. Sprijinindu-vă de cadru împingeți-vă în sus din brațe, apoi coborâți încet pe scaun.

Coborârea din scaun

Opriți cât mai aproape posibil cu partea laterală lângă un alt scaun sau pat. Blocați frânele roților din spate, pentru a reduce la minim riscul de cadere la coborârea din scaunul cu roțile, este recomandat să scoateți brațul de pe partea unde se efectuează aceste operațiuni.

Recomandări în legătură cu urcatul sau coborârea pe scări

ATENȚIE: Acest lucru se va realiza doar de către utilizatorii cu experiență în manuirea carucioarelor. În toate cazurile, se recomandă supravegherea unui asistent!

URCARE: Pozitionați scaunul la marginea bordurii pe care doriți să urcați, balasați caruciorul pe roțile din spate în scopul de a ridica roțile din față până pe bordura. Înclinați

trunchiul înainte și împingeți puternic spre înainte roțile din spate. Împingeți în continuare până când roțile din spate sunt urcate în totalitate pe obstacol.

COBORÂRE Pentru a coborî repetați procedura în sens invers. Poziționați caruciorul cu partea din spate a scaunului în fața trotuarului, obstacolului, țineți ferm cu mână roțile din spate, apoi coborâți lent. Echilibrați scaunul cu roțile astfel încât roțile din față să ajungă jos.

ATENȚIE: *Se recomandă să nu utilizați această tehnică, în cazul unei pante mai mari de 10 cm.*

Cotierele sunt detașabile. Rabatarea cotierei este de folos când doriți să coborâți sau urcați în scaun. La unele modele pentru a rabata cotiera este suficient să apăsați butonul de eliberare / și să trageți spre spate bratul de sprijin.

Curățarea și Dezinfectarea

Curățarea tapițeriei și căptușeala se realizează folosind o soluție de apă și săpun, acestea sunt realizate din Nylon. Nu țineți scaunul direct în soare, sau în ploaie. Este strict interzis să faceți duș în acest scaun. Dacă scaunul intra în contact cu apa, uscați bine și ungeți cu ulei acolo unde este necesar.

Curățarea pieselor de cadru și metal puteți folosi soluție de apă și săpun, după care uscați cu o cârpă moale pentru a nu zgâria vopseaua cadrului.

Curățarea de roți și frâne În mod similar roțile pot fi curățate cu apă și săpun. Acordați o atenție deosebită la uscare: este foarte periculos utilizarea scaunului cu roțile încă umede! Verificați presiunea aerului în anvelope și gradul de uzură al acestora. Umflați dacă este necesar, sau înlocuiți. Spițele trebuie verificate cel puțin o dată pe an. Trebuie să curățați periodic roțile pentru a elimina mizeriile prinse la roți.

Dezinfecare Atenție: Nu utilizați niciodată acizi, soluții alcaline sau solvenți cum ar fi acetona sau diluant. Pentru a utiliza scaunul în condiții de siguranță, ar trebui să verificați des frânele, să verificați vizual dacă spătarul/sezutul este în stare bună și nu prezintă rupturi.

Condiții de acordare a garanției

Toate produsele Dr.Happy sunt garantate împotriva defectelor de material pentru o perioadă de doi (2) ani de la data de vânzare a produsului, sub rezerva limitelor și excepțiilor specificate mai jos. Această garanție nu se aplică în cazul unei utilizări incorecte, abuz sau modificarea produsului și incapacitatea de a urma instrucțiunile de utilizare.

Utilizarea corectă prevăzută a produsului este indicată în acest manual. AxaBio Medical nu este responsabilă pentru orice daune, accidente sau orice altceva cauzate sau legate de

instalarea și/sau utilizarea echipamentelor neconforme, sau nerespectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualele de instalare, asamblare și utilizare.

AxaBio Medical. nu garantează produsele împotriva daunelor sau defecte în următoarele condiții: dezastre naturale, întreținerea sau repararea de către neautorizate, utilizarea de părți sau componente care nu sunt originale nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, modificări neautorizate, daune de transport. Garanția nu acoperă părțile consumabile cauciucuri, camere, etc.

Reparatii si garantii

O reparație nu reînnoiește sau extinde garanția. Costurile de reparație și de livrare care nu sunt acoperite de garanție vor fi suportate integral de către client..Piese originale de schimb sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii.