

Manual de instrucțiuni JL973-



A. Instalare și ajustare.

1. Deschide cadrul scaunului cu roțile. Așa cum se vede în imaginea 1.
2. Asamblează centura pentru picioare, așa cum se vede în poza 2.



Poza 1



Poza 2

3. Montează brațul ambelor părți și asigură-te că butonul iese din gaură pentru a fixa armrest.as poza 3.

Cotiera este cotiera detașabilă. Apasă butonul și trage cotiera în sus pentru a-l scoate, așa cum se vede în imaginea 4.



Poza 3



Poza 4

4. Fixați șurubul de sprijin pentru picioare, așa cum se vede în Imaginea 5.



B. Siguranță și întreținere:

1. Verificați strângerea șuruburilor și stabilizarea cadrului scaunului cu roțile înainte de utilizare.
2. Adaugă regulat o cantitate adecvată de ulei lubrifiant în piesele rotative.
3. Fă curățenie frecventă și dezinfectare periodică. Așezat într-un mediu uscat și ventilat.
4. Do nu depășește capacitatea maximă de greutate de 140 kg.