

Instrucțiuni pentru scaunul de toaletă JL8996



1. Detalii despre caracteristici și tehnică

- Cadru din oțel negru
- Cu vârf de cauciuc antiderapant
- Greutate maximă: 110kg

2. Folosirea instrucțiunilor / Siguranță și întreținere

- 1) Scoate produsul din cutie



2) Apoi montează găleata în cadrul cadrului



3) Ajustează înălțimea în funcție de cerere



1. Asamblați produsul conform instrucțiunilor. Înainte de utilizare, verifică stabilitatea cadrului și a șurubului. Utilizatorul nu trebuie să depășească greutatea maximă (110 kg).

2. Folosiți detergent neutru și apă caldă pentru curățare. Nu folosi nimic abraziv. După curățare, se recomandă o uscare bună. Când nu folosiți, puneți-l într-un mediu uscat și ventilat.