



JLC00601
COMMODE


MANUAL DE UTILIZARE



JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO., LTD



1. Componentă:

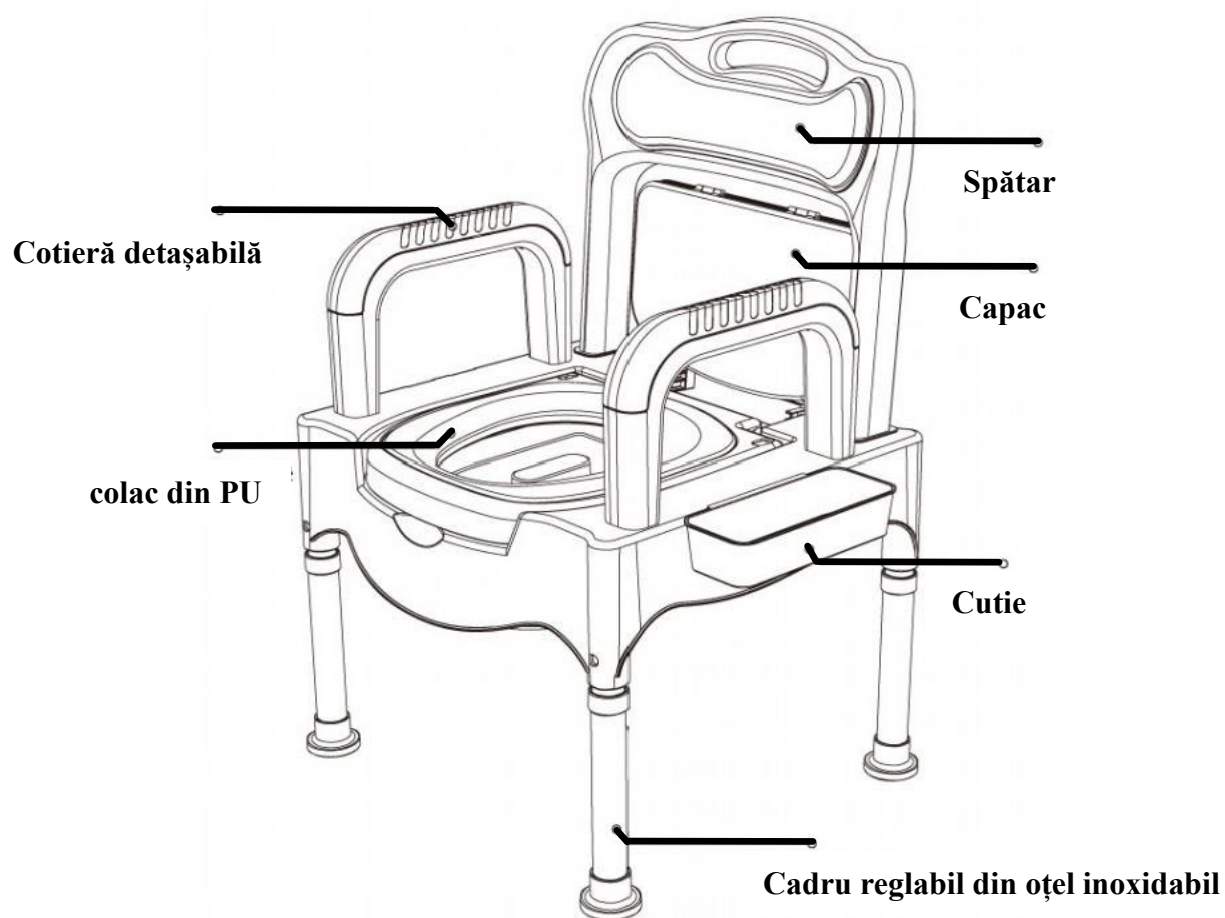

Scaun x



Spătar x 1



Cotieră de



Cutie



Găleată x 1




Tub de picior x



2. Predare

PASUL 1: Inversează toaleta, aliniază tuburile piciorului cu găurile și inserează-le în pozițiile potrivite, verifică și asigură-te că fiecare tub de picior este montat ferm și paralel.

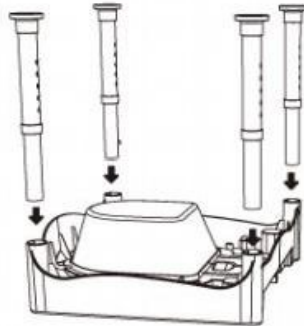

PASUL 2: Aliniază spătarul cu gaura așa cum este indicat în diagramă și apasă ferm pentru a verifica și a te asigura că spătarul este bine montat.



PASUL 3: Aliniază cotierele cu gaura și apasă în jos pentru a verifica și a te asigura că cotierele de pe ambele părți sunt bine **montate**.





PASUL 4: Deschide capacul și inelul de șezut, pune găleata și asigură cutia de șervețel.

