

Scaun multifuncțional JL2000



Descriere

1. Asistarea persoanelor cu mobilitate redusă în deplasarea de la pat la canapea, scaun cu roțile, toaletă
2. Reglați înălțimea totală de la 91-107 cm
3. Cadru alb din oțel durabil
4. Cu pernă moale gri și găleată și capac gri
5. Cataramele duble asigură o securitate ridicată în utilizare.
6. Roți spate de 4" cu frână

Specificatii

Nr. articol	JL2000
Lățime deschisă	53 cm
Lățimea scaunului	43 cm
Adâncimea scaunului	42cm
H:	50-66 cm
Înălțimea spătarului	42 cm
Înălțime totală	91-107 cm
Lungime totală	67 cm
Dia. De roată din spate	4"
Dia. De roată față	4"
Capac de greutate.	100 kg

1. Componente:

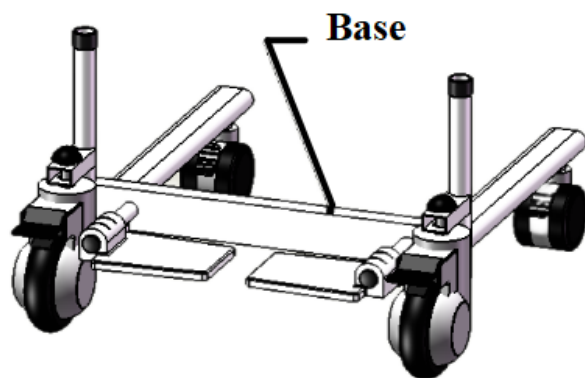


Figure 1

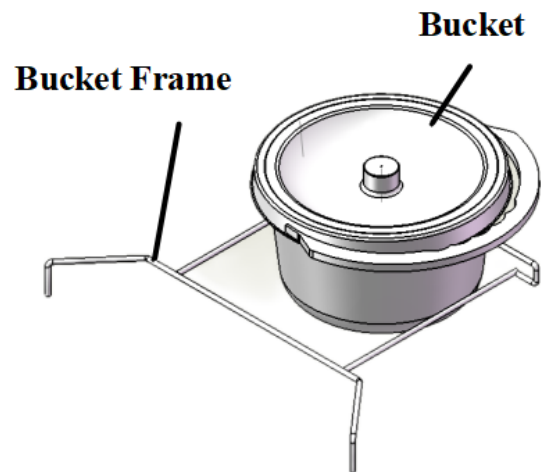


Figure 4


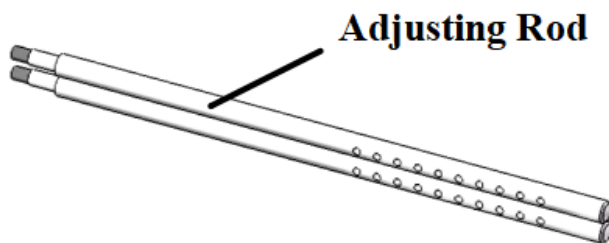


Figure 2

Seat Frame (Right)

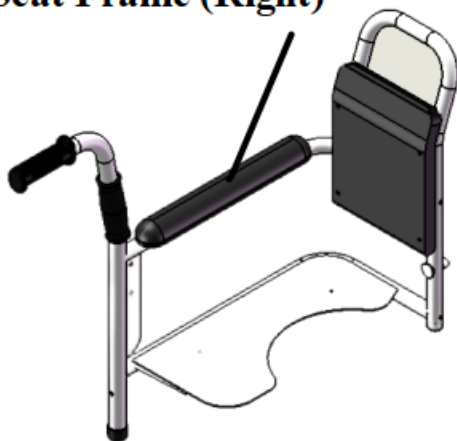

Seat Frame (Left)

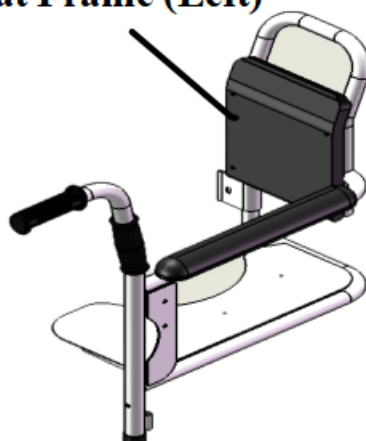


Figure 3


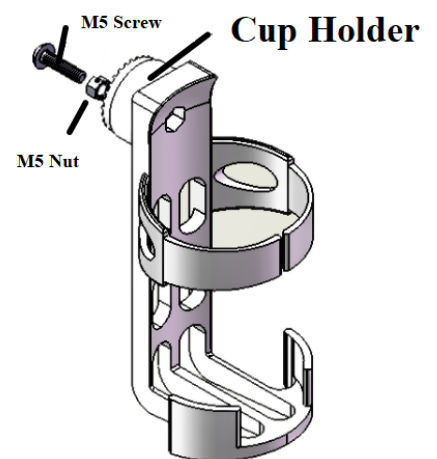


Figure 5

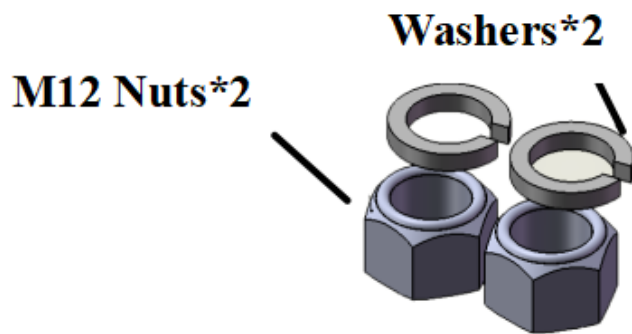

2. Instructions:

Figure 6

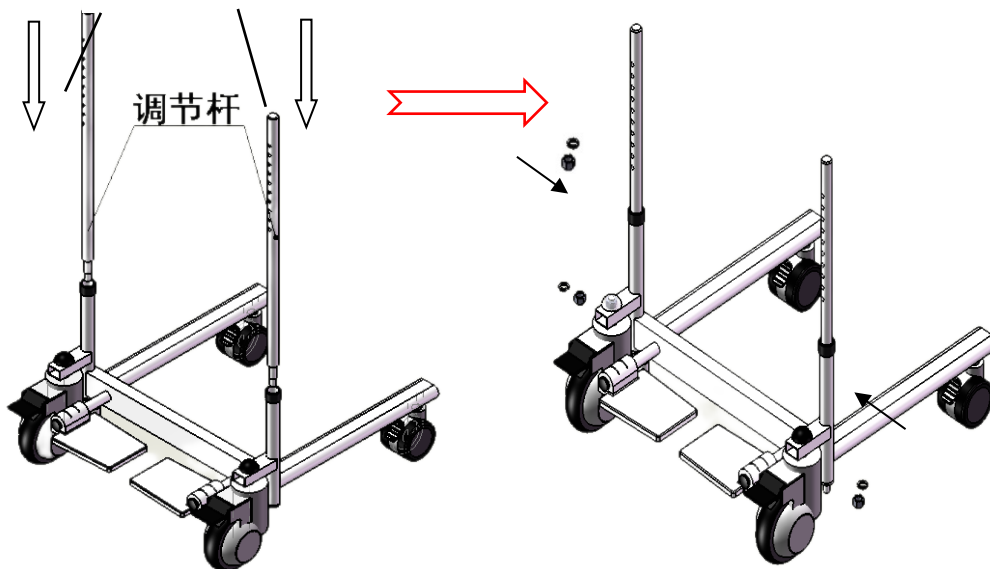


Figure 7

Pasul 1: Introduceți tijele de reglare în găuri. Strângeți tijele de reglare cu șaibe și piulițe.

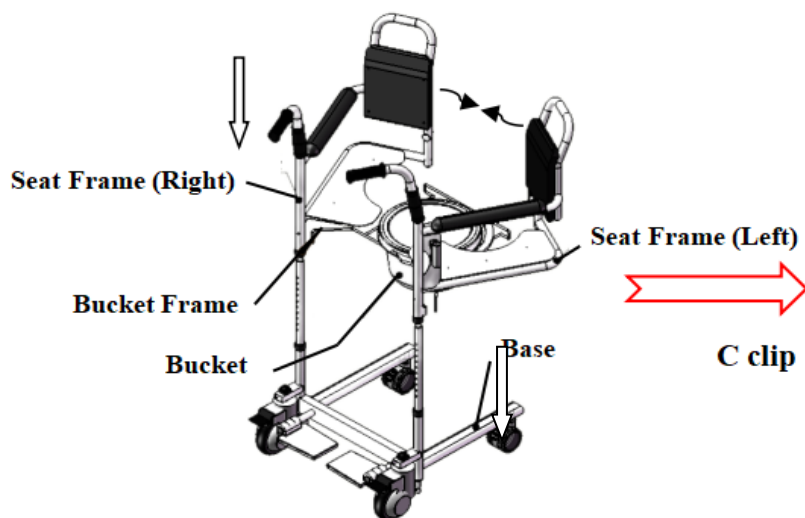


Figure 8



Figure 9

Pasul 2: Introduceți cadrul găleții în găuri și așezați găleata pe cadru. Apoi instalați ambele cadre ale scaunului și asigurați-vă că sunt strânse. Reglați înălțimea adecvată cu ambele cleme C ca figura 9.

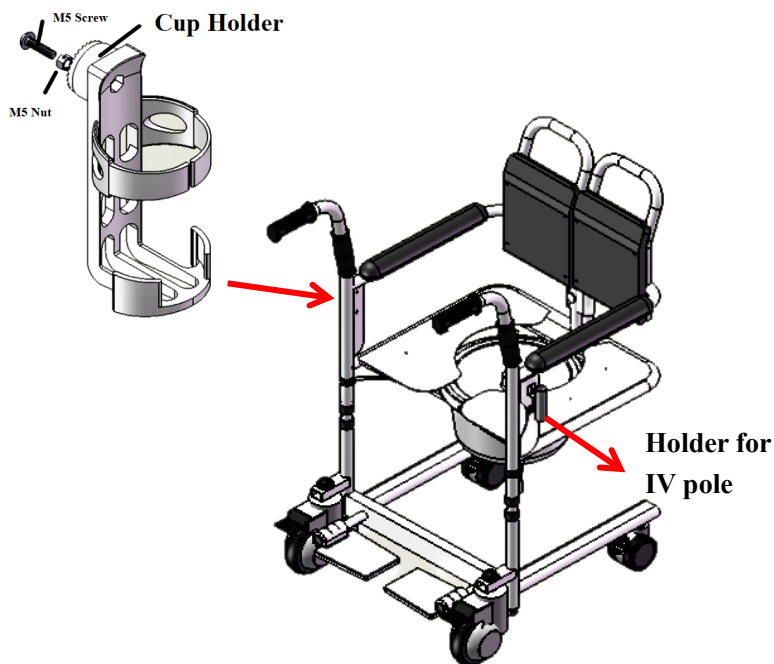


Figure 10

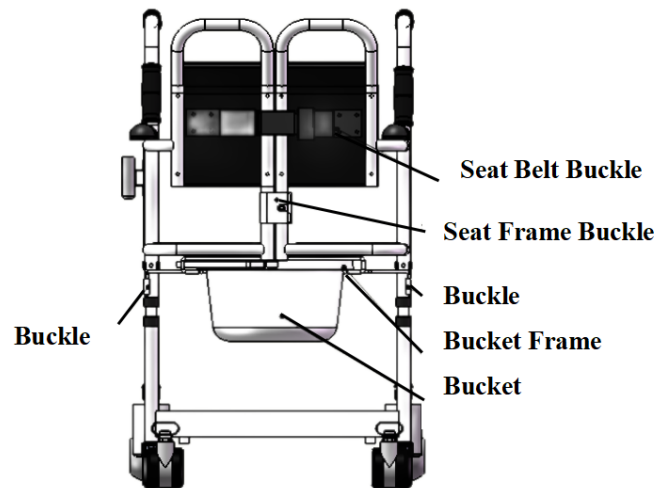


Figure 11

Pasul 3: Asamblați suportul pentru pahare ca figura 10.

Stâlpul IV poate fi introdus în suportul stâlpului IV

Blocați catarama cadrului scaunului și fixați centura de siguranță a cadrului scaunului conform figurii 11.

