

JL901 SCAUN CU ROTILE

1. COMPONENTĂ



2. INSTRUIRE

PASUL 1:

Scoate scaunul cu roțile din cutia de carton (Figura 1) și desfaci cadrul (așa cum este arătat în Figura 2).



Figura 1



Figura 2

PASUL 2:

Scoate suporturile de picioare detașabile și cureaua pentru picioare și despliază suporturile detașabile (Figura 3).



Figura 3

PASUL 3:

Montează suporturile pentru picioare detaşabile pe şuruburile hexagonale (Figura 4).

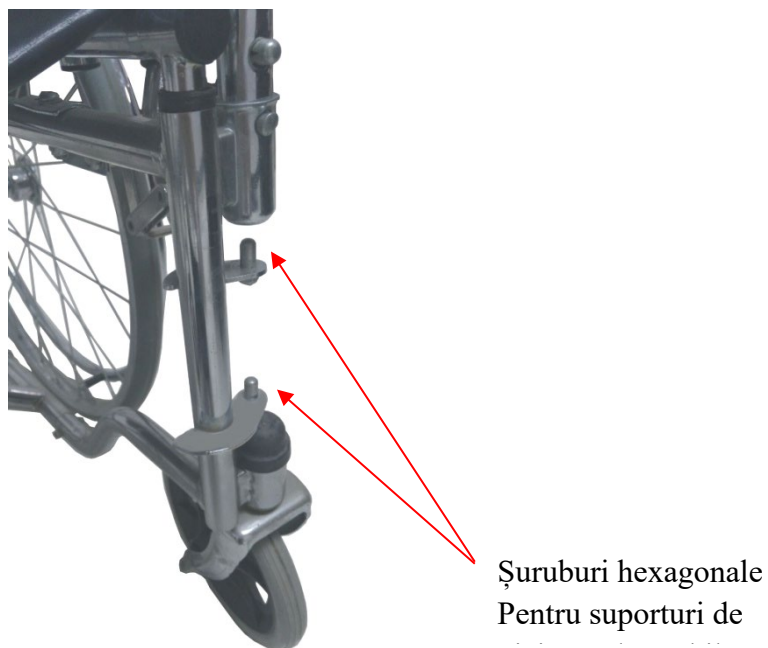


Figura 4

PASUL 4:

Pune cureaua de picior pe suporturile detaşabile (Figura 5).



Figura 5 _____

3. PRUDENȚĂ & ÎNTREȚINERE

- i. Verifică strângerea șuruburilor și stabilitatea cadrului înainte de utilizare.
- ii. Nu depăși capacitatea maximă de greutate de 100 kg.
- iii. Aduă regulat o cantitate adecvată de ulei lubrifianț pe piesele rotative.
- iv. Curățați și dezinfectați regulat și plasați-l într-un mediu uscat și ventilat.