

JL9180LH Instrucțiune pentru rollator

1. Detalii despre caracteristici și tehnică



1	Mânerul de împingere	7	Roata din față
2	Sediu	8	Furcă față
3	Manetă de frână	9	Geantă de cumpărături
4	Ajustare pentru mânerul de împingere		
5	Cadru lateral		
6	Roata spate		

-Cadru albastru din aluminiu

-Înălțimea mânerului reglabilă

-Scaun moale din PVC

-Mânere cu sistem de frânare

-Cu geantă detașabilă

-Cadru lateral cu suport pentru baston

-8" Cast solid

-Înălțimea rollatorului: 82-96CM

-Lungimea rollatorului: 67CM

-Lățimea rollatorului: 62CM

-Lățimea rollatorului pliat: 25CM

2. Folosirea instrucțiunilor / Siguranță și întreținere

1) Scoate tot conținutul din cutie, conform figurii 1.



Figura 1

2) Introdu și răsucește butonul strâns pentru a monta roata din față și roata din spate. Ca figură



Figura 2

3) Montează geanta în rollator și există un suport pentru baston care poate pune bastonul pe el. Așa cum apare în figura 3.



Figura 3

4. Ajustează înălțimea mânerului la poziția potrivită. Ca figura 4.



Figura 4

1. Înainte de utilizare, verificați stabilitatea cadrului și a șurubului.

Utilizatorul nu trebuie să depășească greutatea maximă a sarcinii (100Kg).

2. Fă curățenie frecventă și dezinfectare periodică. Când nu

Folosește-l, plasează-l într-un mediu uscat și ventilat.