

JL9189LH Manual

1. Părți principale ale produsului



2. Parametri de bază ai produsului

Lungime totală: 71,5cm

Lățime totală: 60cm

Înălțime totală: 79-87cm

Lățimea scaunului: 45cm

Înălțimea scaunului: 52cm

Roata față: 10"


Roata spate: 8"

3. Pliază rollatorul

1) Ridică cureaua în sus pentru a se plia




2) Apoi ridică clema roșie de fixare pentru a bloca și plia produsul

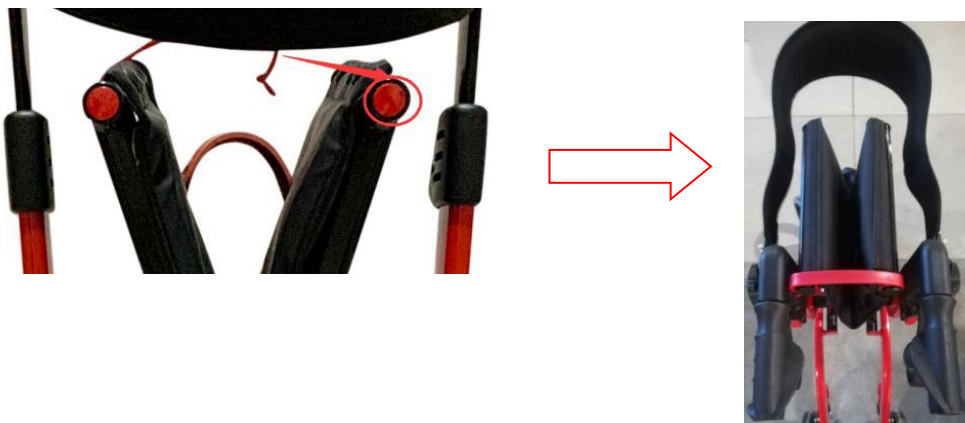

3) Eliberează clema roșie de reținere pentru a desfășura produsul

4. Asamblează sacoșa de cumpărături

Introdu geanta de transport în cadrul produsului.

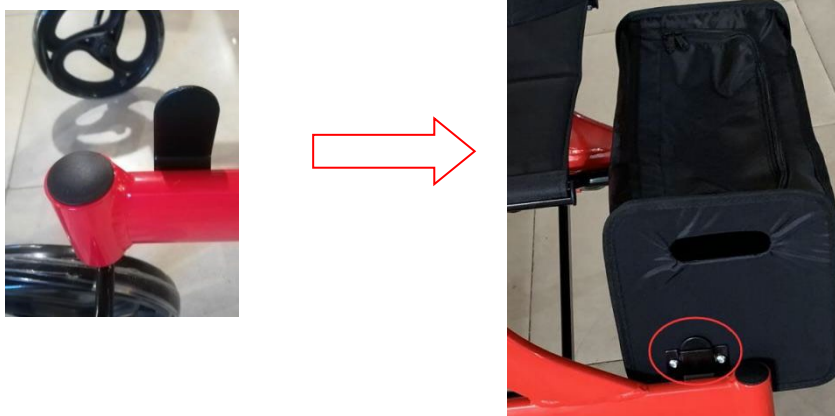

5. Ajustează înălțimea mânerului


Apasă și ține apăsată butoanele roșii de eliberare. Simultan, mișcă mânerul în sus sau în jos. Când se atinge înălțimea dorită, eliberează butoanele roșii de eliberare și mânerul se va bloca automat în următoarea poziție posibilă de înălțime.



6. Frânare

Pentru frânare în mișcare, trageți ambele manete de frână în sus, așa cum este indicat, și frânați întotdeauna încet și constant. Ridicarea frânei eliberează și frâna din poziția blocată.

Blochează frâna. Apasă ambele manete de frână pentru a aplica și bloca frânele în timp ce rollatorul este staționar.

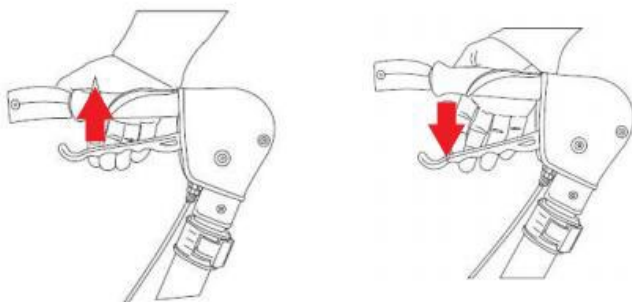

6. Siguranță și întreținere

(1)Înainte de utilizare, verifică strângerea și stabilitatea șuruburilor și a cadrului; Utilizatorii nu trebuie să depășească greutatea maximă a produsului (100 kg);

(2)Efectul frânelor poate fi influențat de abraziunea roților.

Testează regulat frânele.

(3)Nu folosiți un detergent coroziv puternic pentru a curăța suprafața produsului

Produsul nu poate fi lăsat afară în condiții de ploaie

(4)Înainte de a te așeza pe scaun, te rugăm să blochezi ambele frâne pentru a preveni

Rollator de la alunecare. Nu agăța obiecte grele pe niciuna dintre cotiere, deoarece asta va face rollatorul instabil.