

JLZ00202 Instrucțiuni

1. Caracteristică

- Cadru din aluminiu ușor și durabil cu finisaj anodizat
- Fiecare picior are un știft de blocare cu arc pentru ajustarea înălțimii umblătorului
- Cu un buton care poate fi apăsat ușor cu degetele pentru a plia cadru
- Mânerele cu spumă moale oferă o prindere confortabilă și sigură
- Înălțimea lui Walker poate fi ajustată în 8 niveluri



2. Detalii despre tehnică

Punctul nr.	JLZ00202
Tub	Aluminiu extrudat
Înălțime totală	82-93cm
Mâner	Cauciuc
Roata	5"
Greutatea maximă	100 kg

3. Instrucțiuni de utilizare / Siguranță și întreținere

Scoate produsul și accesoriile din cutie. Majoritatea pieselor sunt complet asamblate.

Asamblează panoul alb al șezutului și găleata ca figurile 1 și 2.

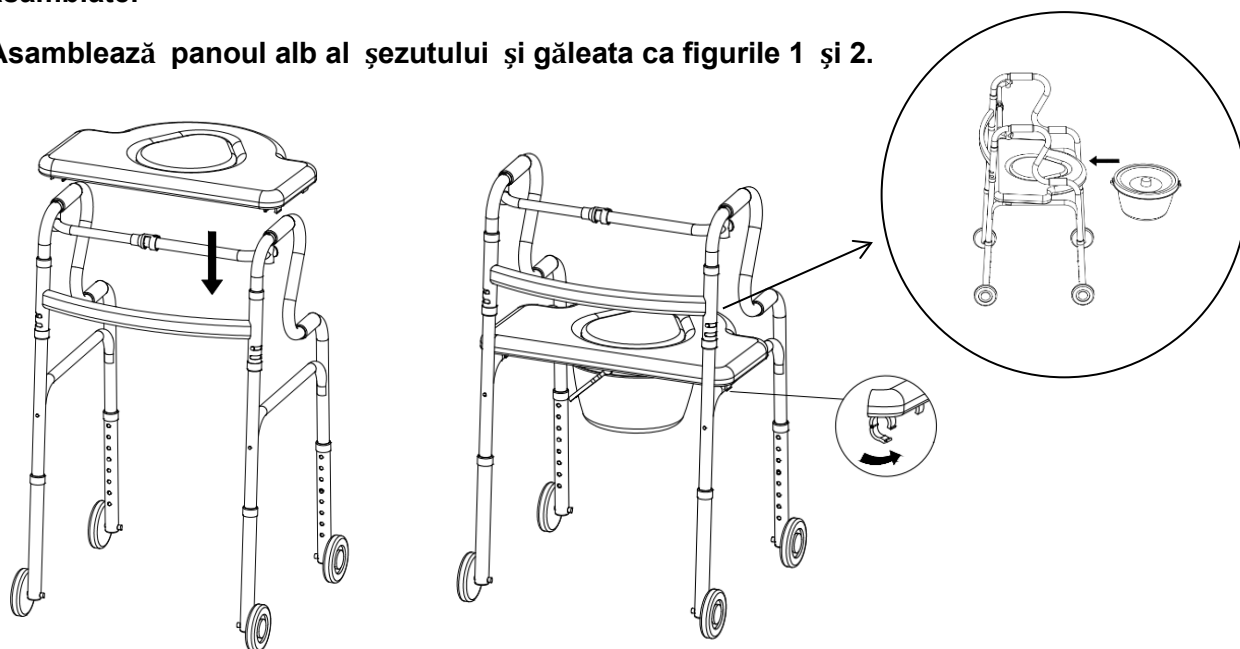


Figura 1 Figura 2

Apasă butonul pentru a ajusta mersul la două moduri diferite, ca figura 3.

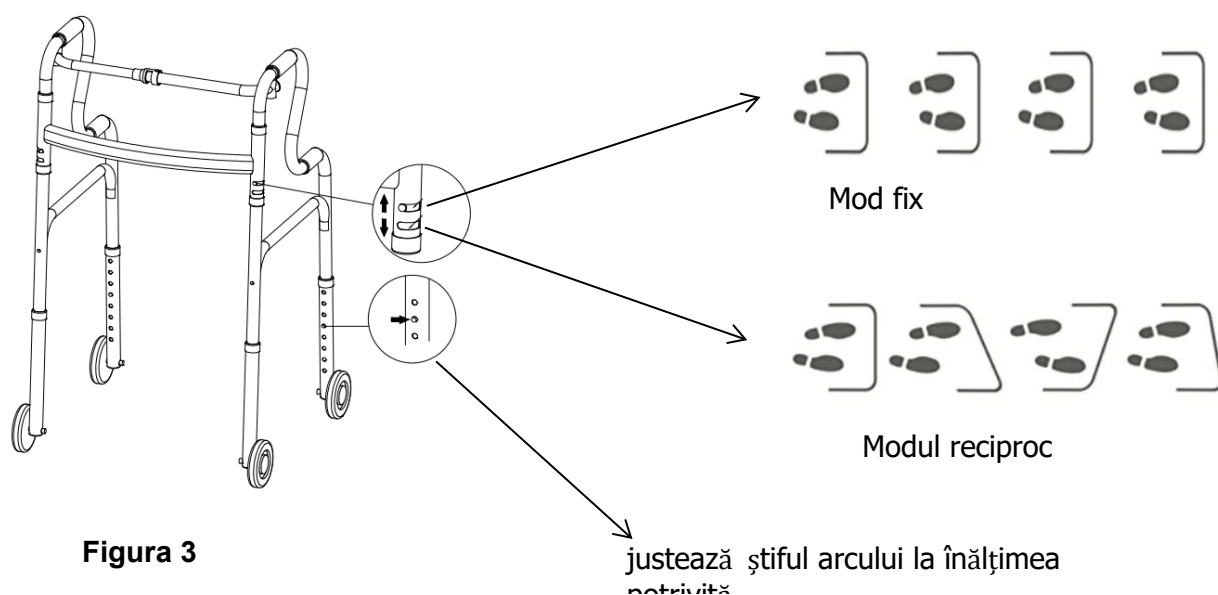


Figura 3

1. Înainte de utilizare, verificați stabilitatea cadrului.

Utilizatorul nu trebuie să depășească greutatea maximă a sarcinii (100Kg).

2. Ajustează înălțimea potrivită ajustând pinul arcului. Când pinul este blocat, se poate auzi un sunet de clic.

3. Fă curățenie frecventă și dezinfectare periodică. Când nu

Folosește, pliază mersul și plasează-l într-un mediu uscat și ventilat