

JLC00101 Scaun de toaletă

Detalii despre produs

- Structură din aluminiu argintiu
- Spătar din plastic albastru cu mâner de împingere
- Cotieră fixă pentru braț
- Scaun în formă de U cu găleată
- Pedală pliantă
- Măsurători:
- Lățime totală: 54 cm
- Înălțime totală: 92 cm
- Lungime totală: 87,5 cm
- Înălțimea scaunului: 51 cm
- Lățimea scaunului: 44cm
- Adâncimea scaunului: 44cm
- Roțile spate: 8" cu frână. Roți față: 5" cu frână
- Utilizator maxim: 120 kg
- Greutate netă a obiectului : 9 kg
- Greutate maximă: 10,8 kg




Assembly instruction



1. Accessory: frame*1 bucket*1 seat*1
rear wheel*2 front wheel*2 pedal tube*2
C clip*2 knob*2 ring*8 screw*2 nut*2
Allen key*1



2: Open the frame, insert the rear wheel (as figure)

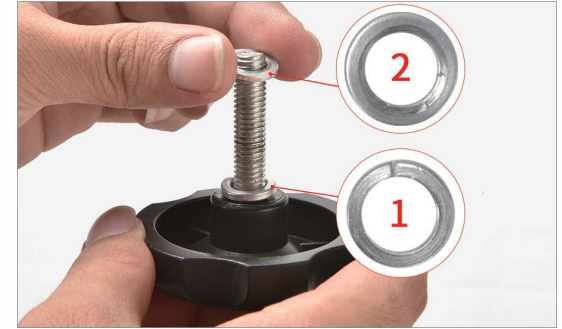

3. Assemble two rings into the knob



4. Use the knob and nut to fix the rear wheel



5. Assemble two rings into the front wheel



6. Press down the brake, twist the wheel and use the C clip to fix the wheel



7. Lock the left and right safety latch before using



8. Use the allen key and screw to assemble the two pedal tubes



9. Assemble the bucket and seat

1. Citește instrucțiunile înainte de utilizare.

Verifică strângerea șuruburilor și stabilizarea cadrului produsului

Înainte de utilizare. Asigură-te că scaunul de toaletă este complet extins.

Ambele tuburi ale spătarului sunt fixe.

2. Înainte să te așezi pe scaun, asigură-te că cele patru roți sunt blocate. Asigură-te că găleata este introdusă în șina de ghidare de sub scaun și că capacul scaunului este îndepărtat. Găleata se poate îndepărta ușor.

3. Utilizatorii nu trebuie să depășească greutatea maximă a sarcinii (100Kg)

4. Fă puțină curățenie frecventă și dezinfectare periodică. Plasează

Produs într-un mediu uscat și ventilat.